



Information för fysioterapeuter angående BA-tub (Bronchitis Aid Tub)

From januari 2006 kommer andningsflaskan som används som andningshjälp vid motståndsandning att tas bort och ersätts av BA-tuben.

Detta görs av två skäl:

1. Risk för tillväxt av bakterier i vattnet och andningsflaska/slang går ej att rengöra och desinfektera tillfredsställande.
2. Svårigheter att mäta vilket motstånd som patienten får andas emot.

Utandning mot ett motstånd, PEP= positive expiratory pressure, syftar till att under träningen, sänka utandningsflödet, höja andningsmedelläget och underlätta sekretelemination. Utandningsmotståndet ska alltid testas ut av leg. fysioterapeut som regelbundet ska följa upp träningen och kontrollera patientens andningsteknik.

Är patienten ordinerad luftrörsvidgande medicin ska den inhaleras minst 15 minuter före andningsträning.

Utprovning av utandningsmotstånd.

Rätt motstånd provas ut med manometer och den röda hatten på BA-tuben. Motståndet varieras steglöst mellan siffrorna 0-7. Störst motstånd på 0 då ventilen är stängd.

Det motstånd som patienten klarar i 2 minuter i sträck då manometern visar på 100-150 mm H₂O är att rekommendera.

Sätt på den blå hatten och ställ in rätt motstånd.

Rengöring

Daglig rengöring. Placera medföljande pinne i tuben, tryck av den blå hatten. Rengör under hett vatten, eller i diskmaskin. Skaka av vattnet och lufttorka. Sätt ihop delarna så att hattens pil pekar mot sifferskalan, tryck sedan ihop tills det hörs ett knäpp. Att koka tuben en minut kan också vara ett bra sätt att rengöra den".

Inköp

Handelshuset Medic 033-230099 kontaktperson Jeanette.BA-tub 83:-, manometer ca 1000:-, kopplingsslang art nr: 382029