

Specialrutin för avtagning och rengöring av visir.



Sprita händerna med handdesinfektion



Ta av visiret bakifrån



Lägg visiret på en plan yta som tål att desinfekteras. Ta på handskar. Blöt en torkduk med ytdesinfektionsmedel



Börja med att desinfektera visirets insida



**Lyft upp visiret medan bordsytan
desinfekteras, därefter läggs visiret
tillbaka med insidan mot bordsytan**



Desinfektera därefter visirets utsida

2020-03-19

Vårdhygien Region Örebro län